



«Desinfektion – Hygiene»

Kompetenz aus einer Hand



Seit 190 Jahren steht der Name Steinfels Swiss für Schweizer Kompetenz in Sachen professionelle Desinfektion und Hygiene. In unseren modernen Produktionsanlagen in Winterthur entwickeln und produzieren Teams aus hochqualifizierten Spezialisten unter strengen Schweizer Qualitätsstandards innovative und hoch-effiziente Produkte nach dem neuesten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Die Corona-Pandemie hat uns allen verdeutlicht, welch hohe Priorität die regelmässige und korrekte Hygiene und Desinfektion hat und wie wichtig ein Produktionsstandort in der Schweiz ist.

Nur dank diesem Standortvorteil war es uns als systemrelevanter Anbieter möglich, die enorme Nachfrage zu decken und unsere Kunden während dieser ausserordentlichen Zeit zu unterstützen.

Beflügelt durch diese und künftige Herausforderungen haben wir unser Desinfektions-Sortiment weiter optimiert und in dieser Broschüre für Sie zusammengefasst.



Hände

Seiten 9–10



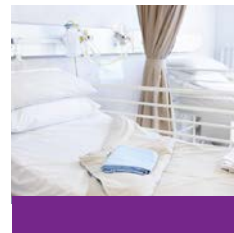
Desinfektionssäulen

Seite 11



Textil

Seiten 12–13



Küche

Seiten 14–15



Objekt

Seiten 16–19



Dosier- und Anwendungshilfen

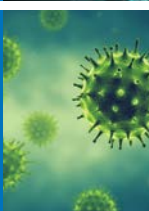
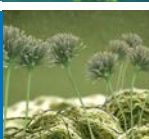
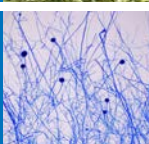
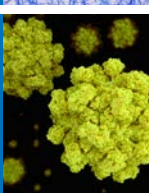
Seiten 20–21



Quadratisch, praktisch, bunt

Unsere Info-Icons für die schnelle Identifikation.

Sie zeigen an, gegen welche Krankheitserreger bzw. Gruppen von Erregern das jeweilige Produkt wirksam ist und ob es RKI-gelistet ist.

BAKT. ZID	Bakterizid Als bakterizid bezeichnet man Wirkstoffe oder Wirkstofflösungen, die Bakterien so stark schädigen, dass sie den irreversiblen Zelltod der Erreger auslösen. Bakterien können durch Tröpfcheninfektion, Hände, Haut, Flächen und Instrumente übertragen werden. Bakterizid wirkende Desinfektionsmittel verringern oder vermeiden im besten Fall die Infektionsübertragung durch Bakterien.	
VIRU ZID	Viruzid Als viruzid bezeichnet man Arzneistoffe oder Desinfektionsmittel, die Viren bzw. ihre Nukleinsäuren einschliesslich der sogenannten unbehüllten Viren so stark angreifen, dass sie den Erreger irreversibel schädigen bzw. inaktivieren. Viren können durch Tröpfcheninfektion, Hände, Haut, Flächen und Instrumente übertragen werden. Viruzid wirkende Desinfektionsmittel verringern oder vermeiden im besten Fall die Infektionsübertragung durch Viren.	
FUNGI ZID	Fungizid Fungizid wirkende Desinfektionsmittel sind Biozide zur Abtötung von Pilzen und ihren Sporen, welche das Wachstum stoppen und so eine Verbreitung über Luft und Böden verhindern.	
SPORI ZID	Sporizid Sporizide Wirkung ist die Fähigkeit eines Produktes, unter festgelegten Bedingungen die Anzahl lebensfähiger Bakteriensporen bestimmter Prüfkeime zu vermindern (gemäss EN 14347).	
NORO	Norovirus Noroviren sind die Hauptursache nichtbakterieller Magen-Darm-Infektionen. Die Übertragung des Virus erfolgt fäkal-oral. Unter schweren Folgen leiden vor allem immungeschwächte Patienten. Diese Viren sind besonders widerstandsfähig und können somit auf Flächen vergleichsweise lange überleben. Wirksame Prävention erfolgt durch professionelle Hygiene; Behandlung durch geprüfte Präparate mit nachgewiesener Noro-Wirksamkeit (MNV).	
C. DIFF.	Clostridium difficile Clostridium difficile ist ein sporenbildendes Bakterium, das verschiedene Formen von Durchfallerkrankungen und Darmentzündungen mit gravierenden Folgen auslöst, die insbesondere für ältere Patienten und Kinder gefährliche Folgen haben können. Für die Desinfektion sollten vorzugsweise Präparate auf Basis oxidierender Wirkstoffe oder RKI-gelistete Produkte mit nachgewiesener Sporizidie verwendet werden.	
VRE MRGN	VRE / ESBL / MRGN VRE besiedeln primär den unteren Gastrointestinaltrakt. Hauptübertragungsweg sind die Hände des Personals durch infizierten Stuhl. Gesundheitsrisiken entstehen dabei in hohem Mass vor allem für Kinder, ältere oder immunsuppressive Patienten. Ein weiteres, grosses Problem stellt die Resistenz der Bakterien gegen Antibiotika dar. Besondere Relevanz haben dabei im Krankenhaus multiresistente gram-negative Bakterien wie z.B. ESBL-Bildner. ESBL ist ein Enzym, das bestimmte Antibiotika inaktivieren kann und damit das Risiko von Antibiotikum-Resistenzen erhöht.	
TB	TB Tuberkulose (TBC, engl. TB) ist eine Infektionskrankheit, die am häufigsten die Lunge befällt und überwiegend durch Mykobakterien verursacht wird. Besorgniserregend ist vor allem die Verbreitung extrem medikamentenresistenter TBC-Stämme. Mykobakterien bleiben in der Raumluft sowie auf Händen, Haut, Flächen und chirurgischen Instrumenten über Stunden infektiös. Zur Prävention und Bekämpfung eignen sich Desinfektionsmittel mit geeigneten Wirkstoffen und breitem Wirkspektrum. Deren Leistungen sollten durch die speziellen Prüfverfahren für Mykobakterien der Euronormen EN 14348 sowie EN 14563 gesichert und gemäss VAH gelistet sein.	

Glossar

Antiseptisch: Gegen Infektionen; verhindert die Vermehrung von Mikroorganismen.

Aseptisch: Keimfrei; frei von lebenden Organismen.

Bakterien: Kleinste einzellige Mikroorganismen, deren Zellkern nicht von einer Membran umgeben ist (Prokaryonten). Vermehrung durch einfache Zellteilung, Unterteilung in drei Grundformen, Stäbchenbakterien, Kugeln (Kokken) und gekrümmte Stäbchen (Spirillen). Erwünschte Bakterien wie z.B. Darmbakterien dienen zur Aufrechterhaltung der Körperfunktionen, unerwünschte Bakterien wie z.B. Salmonellen sind für den Verderb von Lebensmitteln oder Infektionskrankheiten verantwortlich.

Bakteriostatisch: Wachstum und Vermehrung von Bakterien hemmend/aufhaltend, ohne sie zu vernichten.

Bakterizid: Den Zelltod herbeiführende Schädigung der Bakterienzelle durch ein bakterizides Antiinfektivum (z.B. Antibiotikum) oder ein Desinfektionsmittel.

Bazillen: Aerobe oder fakultativ anaerobe, gram-positive, stäbchenförmige Bakterien, die Sporen bilden.

Begrenzt viruzid: Wirksamkeit gegen behüllte Viren.

Biozide: Wirkstoffe oder Zubereitungen zur Abschreckung oder Unschädlichmachung von Schadorganismen auf chemischem oder biologischem Weg. Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte sind keine Biozide.

Coronaviren: Sind eine grosse Familie von Viren, von denen bekannt ist, dass sie Krankheiten von der Erkältung bis hin zu schwereren Erkrankungen wie dem Nahost-Atemwegssyndrom (MERS) oder dem schweren akuten Atemwegssyndrom (SARS) verursachen.

Dekontamination: Entfernung von durch Mikroorganismen oder andere Stoffe ausgelöste Verunreinigung von Räumen, Wasser, Lebensmitteln und Personen. Die Anzahl der Mikroorganismen wird dabei auf ein Niveau reduziert, das weder der Gesundheit noch der Qualität z.B. von Lebensmitteln schadet.

Desinfektion: Prozess zur Reduktion der Anzahl vermehrungsfähiger Mikroorganismen infolge Abtötung/Inaktivierung unter Angabe eines standardisierten, quantifizierbaren Wirkungsnachweises mit dem Ziel, einen Gegenstand/ Bereich in nicht mehr infektiösgeschädigten Zustand zu versetzen. Ziel der Desinfektion ist die definierte Verminderung der Anzahl pathogener oder fakultativ-pathogener Mikroorganismen.

Desinfektionsmittel: Chemische Substanzen oder Substanzgemische, die Mikroorganismen auf Oberflächen, in Flüssigkeiten oder Gasen abtöten bzw. inaktivieren.

Flächendesinfektion: Desinfektion von unbelebten Oberflächen wie Fussböden, Inventar und Geräten.

Fungistatisch: Das Wachstum und die Vermehrung von Pilzen hemmend.

HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point – Gefährdungsanalyse zur Identifizierung kritischer Punkte zum Schutz der Endverbraucher; durch LMHV (Lebensmittelhygiene-Verordnung) seit 1998 in Lebensmittelbe- und -verarbeitenden Bereichen vorgeschrieben. Methode zur Qualitätssicherung mit dem Schwerpunkt Hygiene in der Lebensmittelindustrie und im Grossküchenbereich.

Händedekontamination: Keimreduktion auf den Händen mit Hilfe eines Waschpräparates mit keimabtötenden Eigenschaften, heute ersetzt durch «desinfizierende Händewaschung» bzw. «hygienische Händewaschung».

Händedesinfektion, chirurgische: Weitgehende Reduktion der transienten und residenten Hautflora zur Verhinderung der Übertragung von Infektionserregern von den Händen des Operationsteams in den Wundbereich bei operativen Eingriffen. Dazu sind die Hände 3 bis 5 Minuten mit einem Händedesinfektionsmittel systematisch einzureiben.

Händedesinfektion, hygienische: Gezielte Reduktion der transienten Hautflora zur Verhinderung der Übertragung von Infektionserregern durch die Hände bei der Behandlung und Pflege von Patienten. Dazu sind die Hände 30 Sekunden mit einem Händedesinfektionsmittel nach einem bestimmten System einzureiben.

Hygiene: Gesundheitsförderung des Menschen und seiner Umwelt, Zusammenfassung von vorbeugenden Massnahmen gegen das Entstehen und Verbreiten von Krankheiten.

Inaktivieren: In einen Zustand des Verlustes einer ursprünglichen Wirkung versetzen. Bezeichnet bei Viren die Wirksamkeit von Desinfektionsverfahren, da Viren nur über Wirtszellen zur Vermehrung in der Lage sind und über keinen eigenen Stoffwechsel verfügen.

Infektion: Ansteckung. Lokale oder allgemeine Störung des Organismus durch Krankheitserreger, die von aussen in die Organe oder Gewebe eindringen und die Fähigkeit haben, sich zu vermehren.

KBE: Kolonienbildende Einheiten (Keimzahl).

Kontamination: Verschmutzung/Verunreinigung von Räumen, Wasser, Lebensmitteln, Gegenständen oder Personen durch Mikroorganismen oder durch radioaktive Stoffe, biologische Gifte oder chemische Stoffe.

Mikrobiostatisch: z.B. «bakteriostatisch» bedeutet, dass das Wachstum der Bakterien aufgehalten wird. Dagegen bedeutet «bakterizid» das Abtöten von Bakterien.

Mikrobizid: Mikroorganismen abtötend.

Mikrostatisch: Das Wachstum von Mikroorganismen aufhaltend.

MRSA: Methicillin-resistente Staphylococcus-aureus-Stämme. Antibiotika-resistente Mikroorganismen, die entweder von entsprechend kolonisierten oder infizierten Personen in Krankenhäuser eingeschleppt oder dort durch antibiotische Therapie selektioniert werden.

Pathogen/apathogen: Bei Mikroorganismen unterscheidet man pathogene (krankheitserregende) Arten, wie z.B. Salmonellen, und apathogene Arten, die oftmals sogar sehr nützlich sind, wie z.B. Milchsäurebakterien.

Peressigsäure: Sauerstoffaktive Verbindung der chemischen Formel $\text{CH}_3\text{CO}-\text{OOH}$. Starkes Oxidationsmittel und daher in höheren Konzentrationen leicht entflammbar und explosive Substanz. Verdünnte Lösungen werden gerne als Desinfektionsmittel eingesetzt, da sie einerseits hervorragende mikrobizide Eigenschaften besitzen, andererseits aber als Reaktionsprodukte lediglich Wasser und Essigsäure entstehen. Nachteil: sehr korrosiv.

QAV: Quartäre Ammoniumverbindung.

Resistenz: Genetisch bestimmte, von kulturbezogenen Bedingungen unabhängige Unempfindlichkeit.

RKI: Robert-Koch-Institut, ehemals Bundesgesundheitsamt. Erforscht und dokumentiert übertragbare Krankheiten beim Menschen. 1891 gegründet als Königlich Preussisches Institut für Infektionskrankheiten nach dem Vorbild des Pariser Institut Pasteur. Blieb stets universitätsunabhängig und verband von Anfang an Grundlagen- und angewandte Forschung.

RKI-Liste: Desinfektionsmittel-Liste des RKI (vom Amtsarzt für den Seuchenfall empfohlene Verfahren).

Schnelldesinfektion: Desinfektionsmassnahme zur schnellen Abtötung bzw. Inaktivierung von Mikroorganismen. Entsprechende Mittel, meist auf Alkoholbasis, sollten nur auf sauberen Flächen angewendet werden.

Sporizid: Die Eigenschaft, Sporen (bakterielle und pilzliche) abzutöten.

Sprühdesinfektionen: Eignen sich zur schnellen und sicheren Desinfektion von Flächen und Inventar, wobei beachtet werden muss, dass die zu desinfizierenden Flächen während der Einwirkzeit voll benetzt werden.

Steril: Bedeutet «frei von vermehrungsfähigen Organismen und ihren Sporen».

Sterilisation: Abtöten oder Inaktivieren aller Mikroorganismen auf Oberflächen, in Flüssigkeiten oder Gasen mit dem Ziel, deren Weiterverbreitung zu verhindern. Sterilisation wird mit Hitze durchgeführt. Man unterscheidet zwischen der Dampfsterilisation, der Heissluftsterilisation und der Gassterilisation. Die Dampfsterilisation ist das Verfahren der Wahl und wird für thermostabile Güter verwendet. Für den Gebrauch im Krankenhausbereich haben sich hierbei Temperaturen von 121 °C und 134 °C bewährt. Die Sterilisierzeit variiert je nach der Temperatur und der Art der Verpackung. Die eigentliche Sterilisationsphase setzt sich zusammen aus der Ausgleichszeit, der Abtötungszeit und dem Sicherheitszuschlag. Bei der Heissluftsterilisation chirurgischer Instrumente darf die Solltemperatur von 180 °C aus Gründen der Sterilisierbarkeit nicht unterschritten werden. Bei der Gassterilisation, die für thermolabile Medizinprodukte eingesetzt wird, unterscheidet man zwischen der Ethylenoxid- und der Formaldehyd-Sterilisation. Bei der Ethylenoxid-Sterilisation liegt der Temperaturbereich zwischen 37 °C und 60 °C. Bei der Formaldehyd-Sterilisation ist der optimale Temperaturbereich zwischen 60 °C und 70 °C bei einer üblichen Expositionszeit von einer Stunde.

VHD: Vereinigung der Hygienefachkräfte der Bundesrepublik Deutschland e.V. Vertritt die Berufsinteressen der Hygienefachkräfte sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.

Viren: Kleinste Krankheitserreger. Sie sind nicht eigenständig lebensfähig, sondern benötigen dazu fremde Wirtszellen. Sie bestehen aus dem notwendigen Träger der Erbinformation (Nukleinsäuresequenz), der durch einen Proteinmantel und ggf. durch eine zusätzliche lipidhaltige Hülle umgeben ist.

Virusinaktivierung: Hemmung der Vermehrungsfähigkeit von Viren (v.a. zur Herstellung von Plasmaderivaten und Impfstoffen).

Virusinaktivierend: Ausschalten einer Viruskontamination, z.B. durch geeignete chemische Desinfektionsmittel.

Viruzid: Bewirkt eine vollständige bzw. dauerhafte Virusinaktivierung.

Wäschedesinfektion: Krankenhauswäsche sollte grundsätzlich durch Wäschedesinfektion mit chemischen Mitteln oder die chemothermische Wäschedesinfektion desinfiziert werden.

Wirksame Lösungen für Haut und Hände

Richtiger Schutz für Ihr wichtigstes Werkzeug.

Die beste Hygienelösung liegt auf der Hand.

Ca. 90% aller Infektionen werden über die Hände übertragen. Damit ist die Händedesinfektion die wichtigste Präventionsmassnahme. Der Wirkungsumfang unserer Produkte zur Händehygiene ist speziell auf Ihre täglichen Herausforderungen am Arbeitsplatz ausgerichtet. Unsere Formulierungen sind auf den jeweiligen Hauttyp abgestimmt, schützen dabei die beanspruchte Haut und erhalten so ihre natürlichen Feuchtigkeitsressourcen.

Händedesinfektion versus Händewaschen.

Händewaschen ist keine ausreichende Alternative zur Händedesinfektion. Denn nur die Desinfektion ist in der Lage, Keime schnell so weit zu reduzieren, dass keine Krankheitserreger mehr übertragen werden können. Für eine korrekt durchgeführte Desinfektion ist jedoch eine vorangegangene Händewaschung und Trocknung Pflicht. Ebenso ist es von entscheidender Bedeutung für die Effektivität desinfizierender Verfahren, dass die Hände nicht nur desinfiziert und gewaschen, sondern genauso konsequent gepflegt werden.

Quelle: EURIDIKI. Ein Leitfaden zur hygienischen Händedesinfektion, Seite 50, mhp-Verlag, 1996



Empfohlene Schritte zum Desinfizieren der Hände:

Zum Desinfizieren der Hände die empfohlene Menge in die hohlen, trockenen Hände geben und über 30/60 Sekunden nach den aufgeführten Schritten bis zu den Handgelenken einreiben.

- 1 Handfläche auf Handfläche.
- 2 Rechte Handfläche über linken Handrücken und linke Handfläche über rechten Handrücken.
- 3 Handfläche auf Handfläche und Finger verschränkt.
- 4 Rückseiten der Finger auf gegenüberliegende Handflächen, dabei Finger verschränkt; auf die Fingerspitzen konzentrieren.
- 5 Kreisendes Reiben des rechten Daumens in der geschlossenen linken Handfläche – und umgekehrt.
- 6 Kreisendes Reiben mit geschlossenen Fingerkuppen der rechten Hand in der linken Handfläche – und umgekehrt.



Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln

Hände
Oberflächen/Objekt
Küche
Textil

Bakterizid

Levurozid

Tuberkulozid
Mikobakterizid

Fungizid

Begrenzt Viruzid
(z.B. Corona, Influenza)

Begrenzt Viruzid Plus
(Norovirus, Rota, Adeno)

Viruzid

Sporizid

Einsatz- gebiet	Produktname	Wirkstoff	Bakterien	Hefen	Myko- bakterien	Schimmel- pilze	Behüllte Viren	Behüllte Viren+ Norovirus, Rota, Adeno	Unbehüllte Viren	Bakterien- sporen
Hände	Hand Desinfect E	Ethanol, QAV	X	X			X	(X)*		
	Hand Desinfect Gel	Ethanol, QAV	X	X			X	(X)*		
	Hand Antibact	Chlorhexidine DG	X	X			X			
Oberflächen/Objekt	Mikrozid universal wipes	Alkoholgemisch	X	X			X	X		
	terralin PAA	Peressigsäure, Essigsäure, H ₂ O ₂	X	X	X	X	X	X	X	X
	Steinfels Desoclean	QAV	X	X	X		X	X	X	
	Steinfels Floor-Des	QAV	X	X			X	X		
	Steinfels 840 Quick Des	Ethanol	X	X			X	(X)**		
	Eltra 40 Extra	Natrium- percarbonat	X	X			X	X	X	X
	MayaTex 3 Basic chemothermische Textildesinfektion 40 °C	Peressigsäure, Essigsäure, H ₂ O ₂	X	X	X		X	(X)*		
Küche	MayaTex 3 Basic chemothermische Textildesinfektion 60 °C	Peressigsäure, Essigsäure, H ₂ O ₂	X	X	X	X	X	X	X	
Textil										

* nur Norovirus

** Noro- und Adenovirus

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikette und Produktinformationen lesen.



MayaHand Soap

Milde rückfettende und feuchtigkeits-
spendende Handseife
Art.-Nr. 490851



Hand Desinfect E

Alkoholisches Händedesinfektions-
mittel mit Sofortwirkung
Art.-Nr. 490736

Hand Desinfect Gel

Alkoholisches Handdesinfektionsgel
mit Sofortwirkung
Art.-Nr. 490747

Handhygiene und -desinfektion

MayaHand Soap



Milde rückfettende und feuchtigkeitsspendende Handseife, dermatologisch getestet. **Besonders umweltfreundlich und Allergie-Suisse-zertifiziert** (erfüllt schweizerische Umweltkriterien, OECD 302 B, Negativliste, VOC-abgabefrei).

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
490850	Bidon à 5 kg	Karton à 2 Bidons
490851	Flasche à 1 l	Karton à 10 Flaschen
490852	Flasche à 500 ml	Karton à 10 Flaschen
490853	Flasche à 500 ml	Karton à 12 Flaschen

MayaHand Care



Hautpflegende Lotion, angereichert mit pflegenden Wirkstoffen, für jeden Hauttyp geeignet. **Besonders umweltfreundlich** (erfüllt schweizerische Umweltkriterien, OECD 302 B, Negativliste, VOC-abgabefrei).

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
490730	Flasche à 940 ml	Karton à 10 Flaschen
490729	Flasche à 500 ml	Karton à 12 Flaschen
490728	Tube à 50 ml	Karton à 8 Stück

Hand Soap



Milde rückfettende und feuchtigkeitsspendende Handseife, dermatologisch geprüft.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
490810	Bidon à 5 kg	Karton à 2 Bidons
490720	Flasche à 1 kg	Karton à 10 Flaschen
490723	Flasche à 950 g	Karton à 6 Flaschen
490722	Flasche à 600 g	Karton à 12 Flaschen
490724	Flasche à 500 g	Karton à 10 Flaschen

Hand Antibact



Bakterizide Seifencreme. Erzielt eine langanhaltende antibakterielle Wirkung.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
490802	Bidon à 5 kg	Bidon à 5 kg
490801	Flasche à 1 kg	Karton à 10 Flaschen
490800	Flasche à 600 g	Karton à 12 Flaschen

Hand Desinfect E



Alkoholisches Desinfektionsmittel. Erfüllt die Anforderungen zur hygienischen Händedesinfektion (EN 1500). Mit bakterizider und levurozider Wirksamkeit (gemäss EN 1276 und EN 1650). Begrenzt viruzid gemäss EN 14476 (Influenza, Corona, HIV etc.) und wirksam gegen Norovirus.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
490737	Bidon à 4.28 kg	Bidon à 4.28 kg
490740	Flasche à 1000 ml	Karton à 6 Flaschen
490736	Flasche à 850 g	Karton à 10 Flaschen
490734	Flasche à 500 ml	Karton à 10 Flaschen
490738	Flasche à 500 ml	Karton à 12 Flaschen
490732	Flasche à 100 ml	Karton à 16 Flaschen

Hand Desinfect Gel



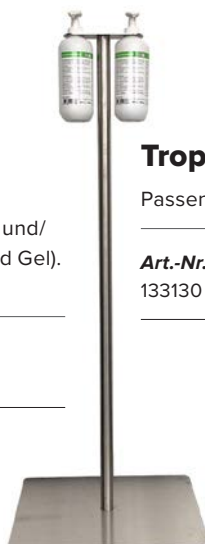
Alkoholisches Handdesinfektionsgel (Ethanol). Erfüllt die Anforderungen zur hygienischen Händedesinfektion (EN 1500). Mit bakterizider und levurozider Wirksamkeit (gemäss EN 1276 und EN 1650). Begrenzt viruzid gemäss EN 14476 (Influenza, Corona, HIV etc.) und wirksam gegen Norovirus.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
490749	Bidon à 4.3 kg	Bidon à 4.3 kg
490744	Flasche à 500 ml	Karton à 12 Flaschen
490745	Flasche à 100 ml	Karton à 16 Flaschen

Desinfektionssäule HDE 500 ml

Desinfektionssäule aus Chromstahl für die Montage von 2 Pump-Flaschen à 500 ml. Anwendung für Desinfektion und/oder Seife (geeignet für Hand Soap, Hand Desinfect E und Gel).
Masse: 100 × 40 × 30 cm

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
132850	Einzeln	Stück

**Tropfschale HDE 500**

Passend zu Desinfektionssäule HDE 500.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
133130	Einzeln	Stück

**Desinfektionssäule All-in-1 HDE 500 ml**

Desinfektionssäule Chromstahl für Montage von 2 Pump-Flaschen à 500 ml inkl. Tropfschale, Displayhalter und 2 Haken für die Anbringung von Handschuhen. (Lieferung ohne Pump-Flaschen.) Masse: 126 × 40 × 30 cm

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
132851	Einzeln	Stück

Wandhalterung HDE 500 ml single

Wandhalterung Chromstahl für Montage von 1 Pump-Flasche à 500 ml für Desinfektion oder Seife (geeignet für Hand Soap, Hand Desinfect E und Gel).
Masse: 10.0 × 10.0 × 6.0 cm

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
133060	Einzeln	Stück

**Wandhalterung HDE 500 ml double**

Wandhalterung Chromstahl für Montage von 2 Pump-Flaschen à 500 ml für Desinfektion und/oder Seife (geeignet für Hand Soap, Hand Desinfect E und Gel).
Masse: 15.5 × 10.0 × 6.0 cm

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
133058	Einzeln	Stück



Weitere Produkte finden Sie jederzeit in unserem eShop >>> eshop.steinfels-swiss.ch



**MayaTex 4
MayaTex 3 Basic**

Die wirksame Kombination für das
40 °C chemothermische
Desinfektionsverfahren
Art.-Nr. 380066 / 380061



**MayaTex 1
MayaTex Power Des+
MayaTex 3 Basic**

Die wirksame Kombination für das
60 °C chemothermische
Desinfektionsverfahren
Art.-Nr. 380054 / 380079 / 380061

Textilhygiene und -desinfektion

MayaTex 1

pH-Wert: 9.0



Enzymhaltiges Vorwaschmittelkonzentrat für das **chemothermische Desinfektionsverfahren bei 60 °C** in Kombination mit MayaTex Power Des+ und MayaTex 3 Basic.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
380055	Bidon à 10 kg/9 l	Bidon à 10 kg/9 l
380054	Bidon à 20 kg/19.2 l	Bidon à 20 kg/19.2 l
380052	Bidon à 60 kg/57.6 l	Bidon à 60 kg/57.6 l
380053	Fass à 200 kg/192.3 l	Fass à 200 kg/192.3 l
380399	Fasswagen à 200 kg/192.3 l	Fasswagen à 200 kg/192.3 l

Eltra 40 Extra

pH-Wert: 8.5



Vollwaschmittel für **Desinfektion ab 40 °C**.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
315271	Kessel à 8.3 kg	Kessel à 8.3 kg

MayaTex Power Des+

pH-Wert: 14.0



Alkalischer, flüssiger Waschkraftverstärker für das **chemothermische Desinfektionsverfahren bei 60 °C** in Kombination mit MayaTex 1 und MayaTex 3 Basic.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
380085	Bidon à 13.2 kg/10 l	Bidon à 13.2 kg/10 l
380079	Bidon à 26.5 kg/20 l	Bidon à 26.5 kg/20 l
380075	Bidon à 60 kg/45.3 l	Bidon à 60 kg/45.3 l

**Wasserlösliche
Wäschesäcke**

Für Schmutz- und Infektionswäsche.



Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
123609	Beutel à 25 Stück	Beutel à 25 Stück

MayaTex 3 Basic

pH-Wert: 3.5



Bleichmittelkonzentrat auf Peressigsäurebasis für das **chemothermische Desinfektionsverfahren bei 60 °C** in Kombination mit MayaTex 1 und MayaTex Power Des+. In Kombination mit MayaTex 4 für das **chemothermische Desinfektionsverfahren bei 40 °C**.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
380064	Bidon à 10.5 kg/9.2 l	Bidon à 10.5 kg/9.2 l
380061	Bidon à 20 kg/17.6 l	Bidon à 20 kg/17.6 l
380062	Bidon à 60 kg/53 l	Bidon à 60 kg/53 l
380063	Fass à 200 kg/176.6 l	Fass à 200 kg/176.6 l
380099	Fasswagen à 200 kg/176.6 l	Fasswagen à 200 kg/176.6 l

MayaTex 4

pH-Wert: 9.6



Fein- und Wollwaschmittelkonzentrat für das **chemothermische Desinfektionsverfahren bei 40 °C** in Kombination mit MayaTex 3 Basic.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
380068	Bidon à 10 kg/9.3 l	Bidon à 10 kg/9.3 l
380066	Bidon à 20 kg/18.6 l	Bidon à 20 kg/18.6 l



Spendereimer

Art.-Nr. 218530

Zur Aufbewahrung der
getränkten Vliesrolle
(Desinfektionstücher
trocken, Art.-Nr. 218520)



Steinfels 840 Quick-Des 70

Schnelldesinfektionsmittel,
alkoholhaltig, muss nicht
nachgespült werden. Sofort
und unverdünnt einsatzbereit.
Art.-Nr. 218402

Küchenhygiene und -desinfektion

MayaLav

pH-Wert: 14.0



Chlor- und phosphatfreies Universal-Geschirrwaschmittelkonzentrat für Wasserhärten bis 25 °fH. Ist nicht geeignet für Aluminium. Besonders umweltfreundlich (erfüllt schweizerische Umweltkriterien, OECD 302 B, Negativliste, VOC-abgabefrei). MayaLav ist als Waschverfahren für die **chemothermische Desinfektion** vom BAG homologiert (CHZN0230).

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
280110	Bidon à 12.80 kg/9.5 l	Bidon à 12.80 kg/9.5 l
280125	Bidon à 25.60 kg/19 l	Bidon à 25.60 kg/19 l
280140	Fass à 256 kg/190 l	Fass à 256 kg/190 l
280199	Fasswagen à 256 kg/190 l	Fasswagen à 256 kg/190 l
280150	Container à 741 kg/550 l	Container à 741 kg/550 l

MayaOxy Basic

pH-Wert: 1.3



Bleich- und Desinfektionszusatz zu Geschirrwaschmittel, hervorragend geeignet für besonders hartnäckige Verschmutzungen wie Kaffee- und Teerückstände. Besonders umweltfreundlich (erfüllt nur europäische Umweltkriterien). MayaOxy ist als Waschverfahren für die **chemothermische Desinfektion** vom BAG homologiert (CHZN0230).

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
280010	Bidon à 10.50 kg/9.3 l	Bidon à 10.50 kg/9.3 l

Steinfels 840 Quick-Des 70

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel
Für die Desinfektion von kleinen Arbeitsflächen und Geräten, besonders für den Küchenbereich geeignet. Muss nicht nachgespült werden. Wirksubstanz: Ethanol.
Bakterizide und levurozide Wirksamkeit (EN 13727 / EN 13624) sowie begrenzt viruzid (EN 14476: Influenza, Corona, HIV, etc.) und wirksam gegen Norovirus.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
218404	Bidon à 4.23 kg/5 l	Bidon à 4.23 kg/5 l
218406	Flasche à 1000 ml	Karton à 6 Flaschen
218402	Flasche à 500 ml	Karton à 6 Flaschen

Spendereimer weiss

Zur Aufbewahrung der getränkten Vliesrolle (Desinfektionstücher trocken, Art.-Nr. 218520).

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
218530	Eimer, 1 Stk.	1 Stk.

Desinfektionstücher trocken

Ideal geeignet für die **Desinfektion von Oberflächen** mit dem entsprechenden Desinfektionsmittel (bspw. Steinfels 840 Quick-Des 70, Steinfels Desoclean, Steinfels Floor-Des etc.). Bietet in Verbindung mit dem Spendereimer (Art.-Nr. 218530) kontrollierten Verbrauch bei praktischer Einzeltuchentnahme.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
218520	Rolle à 90 Tücher	Karton à 6 Rollen

Schülke mikroZid® universal wipes

Gering alkoholische **Tücher zur Schnelldesinfektion** für Medizinprodukte in allen Bereichen und wischbaren Flächen aller Art mit erhöhtem Infektionsrisiko. Gute Materialverträglichkeit. (ohne Parfüm)

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
500485	Beutel à 100 Tücher	Karton à 6 Beutel

ClaraClean® Go! SX 120 Grün, Reinigungstücher

Unbeladene Einweg-Reinigungstücher.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
124942	Pack à 50 Stück	Karton à 20 Pack



Steinfels Desoclean

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, auch zur maschinellen Anwendung geeignet.
Art.-Nr. 500431



ClaraClean® Go! Blau

Mit alkalischem Reinigungsmittel beladene Einweg-Bodenreinigungstücher
Art.-Nr. 124944



Spendereimer und Desinfektionstücher

Ideal geeignet für die Desinfektion von Oberflächen mit dem entsprechenden Desinfektionsmittel
Art.-Nr. 218530/218520

Objekthygiene und -desinfektion



**ClaraClean® Go!
SX 110 Rot
Reinigungstücher**

Einweg-Reinigungstücher
für sanitäre Anwendungen
Art.-Nr. 124941



Steinfels Floor-Des

Oberflächendesinfektionsmittel,
auch zur maschinellen Anwen-
dung geeignet.
Art.-Nr. 500430



**Schülke mikrocid®
universal wipes**

Alkoholische Tücher zur
Schnelldesinfektion
Art.-Nr. 500485

Steinfels Floor-Des

pH-Wert: 7.3



Oberflächendesinfektionsmittel, mit der Einscheibenmaschine, im Nasswischverfahren wie auch bei der manuellen Reinigung einsetzbar. Für poröse und nichtporöse Flächen.

Wirksam auch gegen Norovirus.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
500430	Bidon à 10 kg/10.1 l	Bidon à 10 kg/10.1 l

Steinfels Desoclean

pH-Wert: 12.5



Reinigungs- und Desinfektionsmittel für sämtliche glatten Oberflächen, Gerätschaften und Einrichtungen. Erlaubt eine gründliche Reinigung mit der Einscheibenmaschine, im Nasswischverfahren wie auch bei der manuellen Reinigung mit gleichzeitiger Desinfektionswirkung. **Wirksam auch gegen Norovirus.** Keine porösen Materialien wie z.B. Holz, Kork, Stein etc. behandeln.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
500431	Bidon à 10 kg/9.4 l	Bidon à 10 kg/9.4 l

Spendereimer weiss



Zur Aufbewahrung der getränkten Vliesrolle (Desinfektionstücher trocken, Art.-Nr. 218520).

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
218530	Eimer, 1 Stk.	1 Stk.

Schülke mikrocid® universal wipes



Gering alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion für Medizinprodukte in allen Bereichen und wischbaren Flächen aller Art mit erhöhtem Infektionsrisiko. Gute Materialverträglichkeit. (ohne Parfüm)

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
500485	Beutel à 100 Tücher	Karton à 6 Beutel

Terralin® PAA



Aktivsauerstoff-basierte Reinigung und Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten (CE 0297).

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
500465	Doppelflasche à 2 × 80 ml	Karton à 12 Doppelflaschen

perform® classic concentrate OXY



BEGRENZT



Desinfektion von Flächen. perform® classic concentrate OXY eignet sich für einen Einsatz in allen Risikobereichen, wo neben breiter Wirksamkeit hohe Anforderungen an das Umweltverhalten und die Anwenderfreundlichkeit eines Flächendesinfektionspräparates gestellt werden. Durch die gute Materialverträglichkeit der Gebrauchslösung kann perform® classic concentrate OXY auch bei Problemwerkstoffen, wie z. B. Acrylglas (Plexiglas), eingesetzt werden.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
500500	Beutel à 40g (für 4 Liter)	Karton à 60 Beutel

Desinfektionstücher trocken



Ideal geeignet für die Desinfektion von Oberflächen mit dem entsprechenden Desinfektionsmittel (z.B. Steinfels 840 Quick-Des 70, Steinfels Desoclean, Steinfels Floor-Des etc.). Bietet in Verbindung mit dem Spendereimer (Art.-Nr. 218530), kontrollierten Verbrauch bei praktischer Einzeltuchentnahme.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
218520	Rolle à 90 Tücher	Karton à 6 Rollen

**ClaraClean®
Go! Grün**

Unbeladene Einweg-Bodentücher.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
124946	28 cm, Pack à 50 Stück	Karton à 12 Pack
124949	40 cm, Pack à 50 Stück	Karton à 10 Pack
124952	60 cm, Pack à 50 Stück	Karton à 6 Pack

**ClaraClean® Go! SX 100
Blau, Reinigungstücher**

Alkalisch beladene Einweg-Reinigungstücher.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
124940	Pack à 50 Stück	Karton à 20 Pack

**ClaraClean®
Go! Blau**

Alkalisch beladene Einweg-Bodentücher.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
124944	28 cm, Pack à 50 Stück	Karton à 12 Pack
124947	40 cm, Pack à 50 Stück	Karton à 10 Pack
124950	60 cm, Pack à 50 Stück	Karton à 8 Pack

**ClaraClean® Go! SX 110
Rot, Reinigungstücher**

Sauer beladene Einweg-Reinigungstücher.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
124941	Pack à 50 Stück	Karton à 20 Pack

**ClaraClean®
Go! Rot**

Sauer beladene Einweg-Bodentücher.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
124945	28 cm, Pack à 50 Stück	Karton à 12 Pack
124948	40 cm, Pack à 50 Stück	Karton à 10 Pack
124951	60 cm, Pack à 50 Stück	Karton à 8 Pack

**ClaraClean® Go! SX 130
Gelb, Reinigungstücher**

Sauer beladene Einweg-Reinigungstücher.

Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
124943	Pack à 50 Stück	Karton à 20 Pack



Ausgusshahn für 2.5 l/5 l/10 l

Erleichtert das Umfüllen
gebrauchsfertiger
Lösungen aus Kanistern.
Art.-Nr. 845357

Bidonschlüssel

Praktische Hilfe zum
Öffnen von Kanistern
Art.-Nr. 849032

Dosier- und Anwendungshilfen

Steinfels Sprühflaschen, 500 ml

Steinfels 840



Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
842046	Einzel	Stück

Messbecher 2.5/5/10/30 dl



Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
842080	2.5 dl	Stück
842081	5 dl	Stück
842082	10 dl	Stück
842083	30 dl	Stück

Sprühkopf für Steinfels-Produkte

Sprühkopf zu Sprühflaschen, 500 ml.



Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
849040	Einzel	Stück

Ausgusshahn für Steinfels-Produkte

Zur Befüllung von Sprühflaschen geeignet.



Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
845357	für Bidon à 2.5 l/5 l/10 l	Stück
845358	für Bidon à 20 l/60 l	Stück
845356	Bidon à 10 l, schmale Flaschen	Stück

Bidonschlüssel für Steinfels-Produkte



Art.-Nr.	Gebinde	Verkaufseinheit
849032	für Bidon à 2.5 l/5 l/10 l	Stück
849033	für Bidon à 20 l/60 l	Stück

Piktogramme

Küchenhygiene

	Backofen		Küche		Geeignet für Aluminium
	Kochherd		Geschirrspülen maschinell		Nicht geeignet für Aluminium
	Dunstabzugshaube		Tauchreinigung		Entkalkung
	Geschirrspülen manuell		Chromstahl		Dosierung elektronisch
	Grill		Steamer		Dosierung manuell
	Kühlschränke/Kühlräume		Gefriersicher		Reinigung mit Sprühflasche

Textilpflege

	Waschen 30 °C		Waschen 60 °C		Dosierung elektronisch
	Waschen 35 °C		Waschen 95 °C		Dosierung manuell
	Waschen 40 °C				

Objekt- und Gebäudereinigung

Anwendungsbereich

	Elastischer Belag		WC, Pissoir		Desinfizieren
	Natur- und Kunststein		Nasszelle (ohne WC, Pissoir)		Fussdusche
	Holz		Mobiliar		Trittsicher nach DIN 18032
	Teppich		Fenster, Glas		Abläufe, Rohre und Syphons

Reinigungsmethode

	Reinigung mit Sprühflasche		Einscheibenmaschine		Sprühextrahieren
	Reinigung manuell		Sprayreinigen		Fleckenentfernung
	Nasswischen		Scheuersaugen		Sprühen manuell
	Schutzbeschichten		Hochdruckreinigen		Schäumen manuell
	Feuchtwischen		Schaumreinigen		Clara Clean System

Ökologie-Zertifikate



Maya



Nordic Swan Ecolabel



EU-Ecolabel



Rainforest Alliance

Schweizer Allergie-Gütesiegel



Produkte und Dienstleistungen, die mit dem Schweizer Allergie-Gütesiegel ausgezeichnet sind, eignen sich besonders für Menschen mit Allergien und Intoleranzen. Für die grosse Zahl von betroffenen Menschen bietet das Schweizer Allergie-Gütesiegel Sicherheit und eine verbesserte Lebensqualität.

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.steinfels-swiss.ch



Steinfels
S W I S S

Schnellsuche

SUCHE DATEIEN ANSPRECHPARTNER

Herzlich willkommen im Shop der Steinfels Swiss

KÜCHENHYGIENE

TEXTILPFLEGE

OBJEKT- UND GEBÄUDEREINIGUNG

GERÄTE UND VERBRAUCHSMATERIAL

REINIGUNGSMASCHINEN

PERSONLICHE HYGIENE UND SICHERHEITSARTIKEL

DOSIER- UND ANWENDUNGSHILFEN

AUTO

SYSTEMLÖSUNG

AKTION

ALLERGIE SÜSSE PRODUKTE

MARKETING

Steinfels
S W I S S

SORTIMENT
Küchenhygiene
Textilpflege
Objekt- und Gebäudereinigung
Geräte und Verbrauchsmaterial
Reinigungsmaschinen
Persönliche Hygiene und Sicherheitsartikel
Dosier- und Anwendungshilfen
Mehr...

DATEIEN
Datenschutzklärung
AGB's

KUNDENDIENST
+41 52 234 44 00
vid@steinfels-swiss.ch

ADRESSE
Steinfels Swiss
St. Gallenstrasse 180
CH-8404 Wetzstein



Shop

- Bestellvorlagen
- Einkaufshistorie

Produktinformationen

- Sicherheitsdatenblätter
- Merkblätter
- Anwendungsvideos
- Preise

Ansprechpartner

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Dienstleistungen

Nachhaltigkeit

News

